




# Alginaatinsekoittaja

*Käyttöohje*

# R-080515

**R-080515 alginaattisekoittaja** on luotettava ja helppokäyttöinen laite alginaatin sekoittamiseen. Saavuttaaksesi optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän laitteelle, suosittelemme, että luet käyttöohjeet huolellisesti läpi.

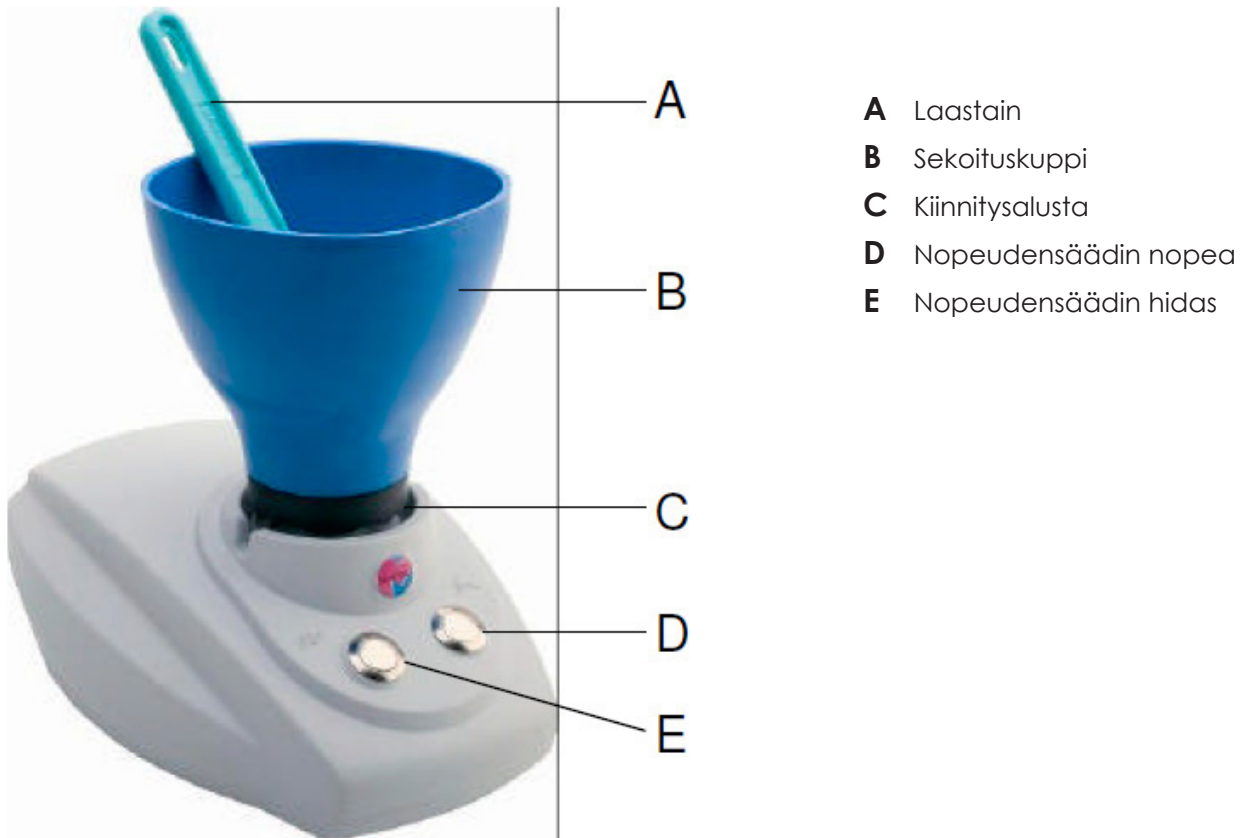

## LAITTEEN ASENNUS

1. Ota alginaatinsekoitin varovasti pakkauksesta. Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:
  - virtajohto
  - sekoituskuppi
  - sekoituslaastain
2. Aseta R-080515 alginaatinsekoittaja tukevalle, tasaiselle alustalle. Laitetta ei koskaan saa sijoittaa lähelle lämmönlähdettä, eikä siihen saa päästä kosteutta. Laite ei myöskään saa altistua tärinälle.
3. Yhdistä virtajohto virtalähteeseen 230V, 50/60Hz
4. Aseta sekoituskuppi (B) sekoittajan kiinnitysalustalle (C) sovittamalla osat yhteen ja käännä sekoituskuppia hieman myötäpäivään.



## KÄYTTÖOHJEET

1. Yhdistä laite virtalähteeseen. Paina käynnistuspainiketta laitteen takana.
2. Aseta sekoituskuppi laitteen kiinnitysalustalle.
3. Kiinnitä sekoituskuppi paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään 1/5 kierrosta (n. 70 astetta)
4. Tarkista, että sekoituskuppi on kunnolla kiinni vetämällä sitä hieman ylöspäin.
5. Mittaa alginaattijauhe ja vesi sekoituskuppiin valmistajan käyttöohjeen mukaisesti.
6. Paina hitaan nopeuden säädintä (kilpikonna) ja aloita esisekoitus käyttäen laastainta apuna. (Laastain tulee laitteen mukana) Sekoita muutama sekunti.
7. Kun esisekoitus on valmis, paina nopean nopeuden säädintä (jänis) ja sekoita laastaimella, painaen sitä sekoituskupin seinämää vasten niin, että laastain on tasaisesti seinämää vasten. (kuva 1) Sekoita jälleen muutama sekunti.
8. Kun alginaattiseos on valmis, kerää alginaatti laastaimella sekoituskupin reunoilta. (Kuva 2)
9. Alginaatti on nyt valmis käytettäväksi.
10. Täytä jäljennöslusikka alginaatilla. Irrota sekoituskuppi laitteesta ja pese se hyvin.

### SEKOITTAMINEN



KUVA 1

### KERÄÄMINEN



KUVA 2

### TÄRKEÄÄ!

Laitteessa on kaksi eri nopeudensäädintä: hidas (kilpikonna) ja nopea (jänis). Laitteen vahingoittumisen kannalta on tärkeää, että niitä ei käytetä yhtä aikaa.

## HUOLTO-OHJEET

Puhdista sekoituskuppi ja laastain huolellisesti joka käytön jälkeen. Huolellinen puhdistus estää lian kertymisen laitteen moottoriin ja sekoituskupin kiinnitysoosiin sekä estää mahdolliset tukokset.

Käytä vain Mestran alkuperäisiä varaosia laitteen huoltotoimissa.

Puhdista laitteen ulkopinta miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liottimia tai herkästi syttyviä aineita.

## VAROTOIMENPITEET

- Ennen kuin kytket laitteen, varmista, että käyttämäsi virtalähde on 230V, 50/60Hz.
- Varmista, että laite ei ole käynnissä, kun sovitat sekoituskupin kiinnitysalustalle.
- Älä anna lasten tai henkilön, joka ei ole saanut käyttöopastusta käyttää laitetta.
- Varmista, että laite on sijoitettu tukevalle, tasaiselle alustalle ja laitteen silikonityyny ovat oikein asetettuina pöytää vasten.
- Odota, että laitteen moottori on pysähtynyt täysin, ennen kuin irrotat sekoituskupin.
- Irrota laite virtalähteestä puhdistuksen ajaksi.

## TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V, 50/60 Hz

Teho: 60 W

Korkeus: 230 mm (sekoituskupin kanssa)

Pituus: 175 mm

Syvyys: 250 mm

Paino: 3 kg